


ALLEGATO (B)

○ Come indossare una mascherina FFP1, FFP2, FFP3 ○



Lavarsi accuratamente le mani prima di indossare la mascherina

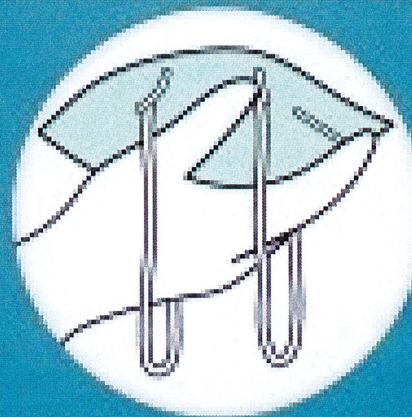


Appoggiare sul palmo della mano la parte esterna della mascherina con lo stringinaso rivolto verso l'alto e i lacci adagiati sul dorso della mano




Posizionare la mascherina sul volto



Tirare l'elastico inferiore e adagiare dietro alle orecchie

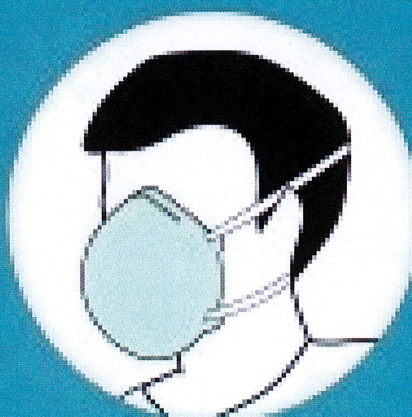

Tirare l'elastico superiore e adagiare sopra alla nuca

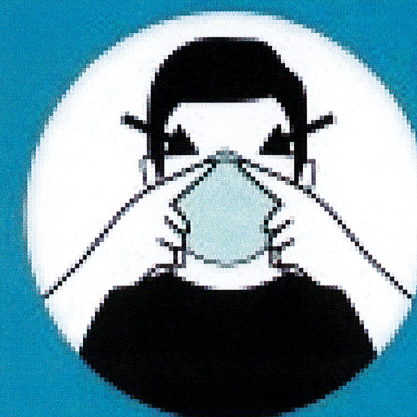

Con entrambe le mani modellare lo stringi naso e controllare l'aderenza della mascherina